


BODYTEMP 478 – Termometro ad infrarossi per misure senza contatto

Istruzioni brevi per la misura

Strumento

- 1- Sensore Infrarosso
- 2- Display LCD
- 3- Selezione Modalità Corpo- Superficie
- 4- Freccia giù
- 5- Freccia su
- 6- Pulsante Mode
- 7- Pulsante di misura
- 8- Comparto batterie

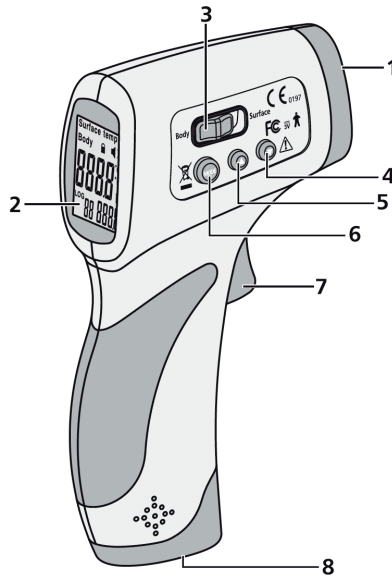

Display

- 1- Indicatore di superficie
- 2- Indicatore di corpo umano
- 3- Misura
- 4- Batterie
- 5- Numero registrazione
- 6- Valore registrato
- 7- Temperatura
- 8- Allarme acustico



Misura

1- Installare le batterie;

2- Alla prima accensione, o appena sostituite le batterie, consigliamo di **attendere 10 minuti di riscaldamento** prima di effettuare la misura;

3- Lo strumento all'accensione effettua un test sulla temperatura dell'ambiente, pertanto potrebbe ritardare la misura di qualche secondo;

4- Puntare il termometro verso la fronte, ad una distanza di almeno 5 cm, e premere l'interruttore di misura.

La misura viene immediatamente mostrata a display.

Assicurarsi che sulla zona misurata non siano presenti capelli, sudore, cosmetici o elementi che potrebbero falsare il risultato.

5- Nel caso la temperatura dell'ambiente sia molto differente, o la fronte molto sudata, è possibile **misurare la temperatura nella parte posteriore dell'orecchio**.

Assicurarsi che sulla zona misurata non siano presenti capelli, sudore, cosmetici o elementi che potrebbero falsare il risultato.

